



Siège élévateur de bain Minivator

Rien de tel qu'un bon bain!





Bliss

“Bonheur parfait,
grand plaisir”

Dictionnaire Anglais Oxford

Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés en utilisant leur baignoire soit en raison de leur état de santé soit à cause de leur mobilité réduite. Si vous avez des difficultés à entrer et sortir de la baignoire vous pouvez envisager d'utiliser un des nombreux produits destinés à rendre l'usage de la baignoire plus sûr et plus facile.

Si vous cherchez à profiter des bienfaits d'un bain sans bouleversement ou coût pour adapter votre salle de bain vous pouvez trouver qu'un siège élévateur de bain est la solution. La plupart des sièges élévateurs de bain sont en fait un siège qui peut être placé de façon sécurisée dans la baignoire lorsque cela est nécessaire. Lorsqu'il est en position levée il doit être à niveau avec le haut de votre baignoire. Vous pouvez alors vous asseoir dans votre siège élévateur de bain et allonger vos pieds et jambes dans la baignoire. Vous abaissez ensuite le siège dans la baignoire, quand elle est déjà remplie, et vous retrouverez le plaisir d'un bain relaxant. Lorsque vous avez fini, le siège élévateur de bain est remis à sa position initiale et vous pouvez sortir du bain sans avoir d'abord à vider l'eau. Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre siège de bain peut être retiré de la baignoire la laissant libre pour d'autres utilisateurs.

Un siège élévateur de bain est souvent préférable à une douche (et un siège de douche) car il vous permet les bienfaits de la relaxation des muscles



Le siège élévateur de bain inclinable Bath Bliss vous fait descendre doucement dans la baignoire et vous propose un choix de trois positions inclinées finales: 10°, 35° ou 45°.

que prendre un bain peut apporter.

Les sièges élévateurs de bain sont également souvent une option préférable à la baignoire à porte du fait qu'une telle baignoire nécessiterait d'être vide quand vous entrez et que vous attendez qu'elle se remplisse. Vous avez ensuite besoin d'attendre jusqu'à ce que l'eau soit évacuée avant d'ouvrir la porte pour sortir de la baignoire. Cela peut provoquer un inconfort car l'utilisateur peut prendre froid durant la période d'attente. L'installation de ces baignoires peut également être assez perturbante et peut nécessiter la remise à neuf de la décoration de votre salle de bain.



Bath Bliss de Minivator Siège élévateur de bain inclinable



Comme le nom le suggère (Bonheur parfait du Bain), le siège

élévateur de bain Minivator est inclinable, vous permettant de vous étendre dans la baignoire.

Cela signifie que votre siège de bain aura besoin d'être placé loin de l'extrémité de la

baignoire car ainsi il y a de la

place pour qu'il s'incline. C'est facile à

faire fonctionner et procure un moyen sûr et confortable de prendre son bain.



Les avantages du Bath Bliss de Minivator

L'équipe de Minivator a travaillé dur pour établir une réputation internationale en tant que fabricant de produits élévateurs sûrs, de qualité fiable. Nos sièges élévateurs de bain ont été conçus avec l'utilisateur à l'esprit et nous sommes assurés qu'ils conviendront pour être utilisés dans la plupart des types de baignoires.

En choisissant Minivator vous choisirez un siège élévateur de bain bien conçu créé pour être pratique tout en ayant une apparence agréable. Conforme aux normes de sécurité internationales, les sièges élévateurs de bain Minivator sont soumis également à une série de tests rigoureux, ainsi votre siège élévateur de bain vous apportera une tranquillité d'esprit vous assurant que vous avez un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance.

Tous les sièges élévateurs de bain Minivator se présentent avec une manette étanche ergonomique qui est simple à utiliser. Le haut et le bas sont

clairement indiqués, la finition est texturée et il y a de gros boutons ce qui permet de les utiliser facilement dans le cas d'une personne à déficience visuelle.

La stabilité dans la baignoire est fournie grâce au système à ventouses puissantes qui fixe de manière sécurisée votre siège de bain en place. La conception des six ventouses puissantes fournit une stabilité supérieure pour les baignoires avec surface anti-glissante.

Tout en reconnaissant qu'il est important que les ventouses s'accrochent bien, il est également nécessaire qu'elles puissent être décollées facilement; nous avons donc inclus un dispositif de décrochage rapide intégral. La poignée sur la structure du siège élévateur de bain rend facile le retrait de votre siège élévateur de bain laissant la baignoire libre pour d'autres utilisateurs ou pour le nettoyage.

Votre siège élévateur de bain Minivator possède également des housses confortables lavables à la machine et il peut être utilisé avec du bain moussant, des produits de bains aux sels ou aux huiles.



Facile à manipuler

L'exceptionnel clip de structure breveté signifie que vous pouvez soulever l'appareil facilement sans que la structure ne s'ouvre lors de la manipulation.

Facile à utiliser

Pour manoeuvrer votre siège élévateur de bain, appuyez légèrement sur le bouton pour choisir la direction du mouvement. Pour arrêter le siège élévateur de bain à tout moment relâchez le bouton.

Le Bath Bliss s'inclinera, selon la position inclinée finale que vous avez prédéfinie, une fois qu'il est arrivé à la fin de son mouvement vers le bas.



Facile à retirer

Tirez simplement sur la poignée de relâchement pour relâcher les ventouses puissantes de devant, puis inclinez le siège en arrière pour relâcher les ventouses et retirez-le, laissant ainsi la baignoire libre pour d'autres utilisateurs.

Le Bath Bliss se sépare en deux parties, chacune d'elle peut être retirée séparément.



Facile à entretenir

Le Bath Bliss peut être nettoyé avec des nettoyants non abrasifs et les housses de confort peuvent être retirées pour être lavées en machine à 60°C.



Sûreté et poids

Le cadre robuste rend notre siège élévateur de bain inclinable Bath Bliss capable de soulever jusqu'à 130kg.

Avec un poids total de 10.7kg, le Bath Bliss est léger et facile à manipuler.

Le cadre robuste mais léger a une garantie à vie.



Facilité pour reprendre un bain

Les sièges élévateurs de bain Minivator permettent aux personnes qui éprouvent des difficultés pour entrer et sortir de leur baignoire, de reprendre des bains relaxants.

Disponibles auprès de nos revendeurs à l'échelle nationale, ils s'adaptent à la plupart des baignoires pour apporter un moyen sûr et fiable pour entrer et sortir de votre baignoire de nouveau.



Pivotant et Coulissant

Ajoute de la mobilité pour un plus grand confort



Disponibles en bleu ou blanc, les plateaux du modèle Pivotant et Coulissant sont conçus pour aider davantage les utilisateurs qui ont des difficultés à tourner le corps ou qui ont besoin d'une assistance pour le bain.

Ils sont placés sur le siège de bain pour assister les utilisateurs à se déplacer du siège de bain vers la position de face, ou à se tourner pour quitter la baignoire.

Convient parfaitement à vos besoins



Le Bath Bliss de Minivator va vous faire descendre tout droit dans la baignoire et s'incliner quand le siège aura atteint le fond de la baignoire.

Il vous donne le choix entre trois positions inclinées finales 10°, 35° et 45°. Vous pouvez facilement déterminer quelle position utiliser lors de l'ajustement du dossier à la base du siège. Vous pouvez choisir une des 3 positions mentionnée chaque fois que vous mettez le dossier en place pour que cela convienne à différents utilisateurs.


Données techniques

Capacité de charge	130kg	287lb
Poids de l'appareil	10.7kg	30.3lbs
Poids de la partie la plus lourde	6.9kg	15.2lbs
Hauteur du siège maximum (A)	431mm	17.0ins
Hauteur minimum du siège	80mm	3.15ins
Hauteur maximum de l'appareil (B)	1005mm	39.5ins
Longueur de l'appareil en position debout (C)	670mm	26.4ins
Distance entre le dossier et le devant du siège (D)	482mm	19.0ins
Largeur maximum du dossier (E)	352mm	13.9ins
Hauteur du dossier à partir du siège (F)	581mm	22.9ins
Largeur du siège sans les cotés latéraux pliables (G)	380mm	15.0ins
Largeur du siège avec cotés latéraux une fois complètement étendu (H)	672mm	26.5ins

Numéro HM: 04.40.01.0xxx

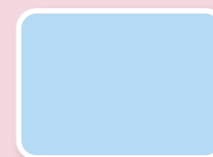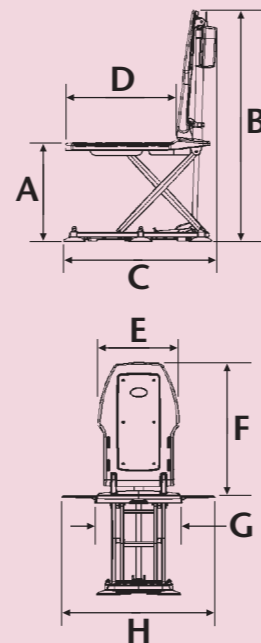

Revêtements
Bleu Egée

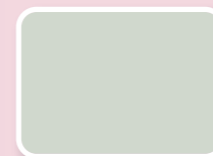

Revêtements
Sauge Argentée

Réponses à vos questions

Cette partie donne les réponses à beaucoup de questions fréquentes concernant les sièges élévateurs de bain. Si vous avez d'autres questions veuillez contacter votre vendeur Minivator, ou un professionnel de la santé. L'un ou l'autre sera ravi de vous aider.



Si mon siège de bain est alimenté par batterie comment puis-je l'utiliser dans l'eau?

Votre Bath Bliss Minivator est fabriqué pour être conforme aux normes de qualité et de sécurité internationales. La batterie est fermée hermétiquement dans un combiné étanche ainsi vous n'avez pas à vous inquiéter de l'utilisation de cet appareil électrique dans l'eau.

Pour recharger, débranchez simplement le combiné et utilisez le chargeur fourni (comme un chargeur de téléphone portable) pour le recharger dans une autre pièce.



Comment savoir si la batterie ne sera pas épuisée une fois que je suis dans le bain?

Le combiné de votre Bath Bliss de Minivator possèdera une indication facilement lisible à l'oeil ainsi vous pouvez voir si la batterie a besoin d'être rechargée. Lorsque le voyant du combiné est de couleur ambre il est temps de recharger.

Vous n'avez pas à vous inquiéter du risque de rester coincé dans la baignoire. Votre Bath Bliss Minivator possède un système intelligent dans son combiné. Il sait s'il y a assez de puissance électrique pour vous sortir de l'eau ainsi il ne vous laissera pas au fond de la baignoire.



Du fait que le siège est en plastique, n'est-il pas inconfortable de s'asseoir dessus?

Votre Bath Bliss Minivator se présente avec des revêtements confortables antidérapants en standard ainsi vous pouvez être sûr de profiter d'un bain confortable. Ils ne vont pas seulement vous aider à éviter de glisser lorsque le siège est dans l'eau, mais, de plus, ils le rendront plus chaud lorsque vous vous apprêtez à l'utiliser.

Les housses peuvent être retirées pour être lavées en machine à 60°C.



Est-ce compliqué à utiliser?

Le combiné de votre Bath Bliss Minivator a deux gros boutons, un pour monter et un pour descendre. Ils sont clairement indiqués et ont des fonctionnalités tactiles qui aident les utilisateurs ayant des déficiences visuelles pour faire la distinction entre les deux.

Pour déplacer le siège dans une des directions, poussez sur le bouton approprié. Si vous relâchez le bouton, le siège va s'arrêter tant que vous ne pressez pas à nouveau sur un des boutons. Il y a également un bouton d'arrêt d'urgence pour plus de tranquillité d'esprit.





Minivator Limited
82 First Avenue
Pensnett Estate
Kingswinford
West Midlands DY6 7FJ
Angleterre

Bureau international: +44 (0)1384 275736
Email/courriel: export@minivator.co.uk

www.minivator.fr



Amérique du Nord
Sterling Stairlifts
10 Industrial Park Drive
Mount Pocono PA
18344
Etats-Unis

Tel: 570 895 2480
Ligne verte: 1 866 276 LIFT/5438
Email/Courriel: info@sterling-stairlifts.com

www.sterling-stairlifts.com

Sites Internet internationaux

www.minivator.co.uk www.minivator.de
www.minivator.es www.minivator.it

Egalement disponible auprès de Minivator

Systèmes de monte-escaliers droits et courbes qui conviennent à la plupart des escaliers



Monte-escaliers Simplicity et Simplicity+



Monte-escaliers Séries 1000 et Séries 2000

Veuillez remarquer que les couleurs réelles peuvent varier légèrement que celles affichées ici. Toutes les informations sont fournies de bonne foi mais ne constituent pas une garantie. Minivator Limited se réserve le droit de modifier les designs et caractéristiques sans avertissement préalable.

0109:5K

